

INSTRUÇÕES DE USO

ADAPTADOR FARMACÊUTICO VÁRIOS BOCAIS INJEX

Fabricado por:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Registro ANVISA nº: 10160619003

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

Instruções de uso:

- Colocar o adaptador na boca do frasco;
- Pressioná-lo com firmeza;
- Inserir o dosador oral no adaptador;
- Virar o frasco e aspirar à quantidade desejada;
- Tampar o frasco;
- Identificar o dosador com a etiqueta (para identificação do paciente e medicamento);
- Tampar o frasco de medicamento;
- Injetar levemente na boca do paciente com a cabeça ligeiramente semi-levantada.