

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **SERINGA HIPODÉRMICA COM DUAS AGULHAS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA – INJEX SAFETY**

#### **Fabricado por:**

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: [www.injex.com.br](http://www.injex.com.br)

Registro ANVISA nº: 10160610074

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

#### **Instruções de uso:**

1. Abrir o blister de forma asséptica;
2. Conectar a agulha para aspiração na seringa para preparação do medicamento, aspirando-o lentamente para evitar formação de bolhas. Após aspirar a dose prescrita pelo médico apertar lentamente o êmbolo para retirar o ar e garantir que não permaneceu nenhuma bolha de ar dentro da seringa;
3. Após a preparação, substituir a agulha para aspiração pela agulha hipodérmica, com o calibre adequado, que será utilizada para a aplicação do medicamento, sendo desta forma o bisel da agulha hipodérmica preservado, evitando-se que a mesma torne-se rombuda;
4. Fazer a assepsia no paciente no local da aplicação;
5. Realizar a aplicação. Injetar o medicamento até o fim, fazendo com que o êmbolo chegue ao final do cilindro. Retirar a seringa com a agulha e colocar algodão seco no local da punção;
6. Após a utilização da seringa, acionar (empurrar) o dispositivo de segurança, utilizando a superfície de uma mesa ou bancada, "alojando" a agulha de forma segura.
7. Descarte a seringa com a agulha hipodérmica e a agulha para aspiração que foram utilizadas no procedimento, em local apropriado após o uso.