

**INJEX** *INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.*  
AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.  
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170  
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br  
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

## INSTRUÇÕES DE USO

### INJEX VÁCUO – ADAPTADOR DE AGULHA PARA SISTEMA DE COLETA MÚLTIPLA A VÁCUO

**Obs: As instruções de uso estão impressas na embalagem primária.**

1- FABRICADO POR:

**SHANDONG CHENGWU SAINUO MEDICAL DEVICES CO., LTD.**

Beicheng Development Zone, North Section of Deshang Road, Chengwu County (West Side, 1000 Meters to the North of Paper Mill), 274200, China.

**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**

**Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.**

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: [www.injex.com.br](http://www.injex.com.br) / **SAC: 0800-770 60 80**

Cadastro ANVISA/MS: 10160610126

#### **I. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto:**

O Adaptador de agulha para sistema de coleta a vácuo da linha INJEX VÁCUO® foi projetado para auxiliar na coleta de sangue com tubos a vácuo.

**II. Orientações suficientes e adequadas para uso ou aplicação correta e segura do produto:**

**Instruções de Uso**

- Escolher o modelo que será utilizado;
- Verifique a data de validade;
- Abra a embalagem da linha INJEX VÁCUO®, Agulha de coleta múltipla, sem retirar o seu protetor;
- Rosqueie a agulha no ADAPTADOR DE AGULHA;
- Aplique o garrote e faça a assepsia local;
- Retire o protetor da agulha;
- Faça a punção e empurre o tubo que está no interior do adaptador contra a agulha (recoberta por uma capa de borracha). A borracha retraindo e a agulha perfurará a rolha do tubo;
- Tão logo o sangue comece a fluir para dentro do tubo, retire o garrote;
- Uma vez que o sangue pare de fluir, indicando que o volume já foi aspirado; retire o tubo de dentro do adaptador. Introduza outro tubo para outras coletas, caso necessário;
- Remova o conjunto adaptador-agulha. Descarte o conjunto em recipiente apropriado para perfurocortantes;
- Se possuir dispositivo de segurança, acione o mesmo antes do descarte;
- Pressione o local da punção com algodão ou gaze esterilizada por alguns segundos;
- Após o uso descarte o produto em local apropriado.

**III. Precauções, cuidados especiais e os esclarecimentos sobre os riscos possíveis com o uso ou aplicação do produto, bem como os cuidados especiais na armazenagem e transporte, quando aplicável:**

Precauções de uso:

- Avaliar as condições da embalagem;
- Avaliar o prazo de validade (utilizar somente se a embalagem estiver intacta);

Advertências:

Produto médico hospitalar de uso único. Descartar após o uso. Proibido Reprocessar.

Manter armazenado em temperatura de 0 a 40 graus Celsius, sobre a proteção de incidência de luz, umidade e calor.

# **INJEX** INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.  
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170  
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br

**Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80**

O produto deve ser mantido em sua embalagem original até o momento de seu uso;


Se a embalagem estiver violada, não utilize.

O produto deve ser mantido em sua embalagem original até o momento de seu uso;

Se a embalagem estiver violada, não utilize.

## **Condições de Armazenamento:**

- Respeitar o empilhamento máximo de caixas;
- Manter as caixas sobre a proteção da incidência de luz, umidade e calor;
- Não amassar ou exercer peso sobre a caixa;
- Armazenar as caixas sobre pallets, mantendo-as afastadas de paredes e chão;
- Manter o produto em sua embalagem original;
- Temperatura de armazenamento de 0 a 40 graus Celsius;

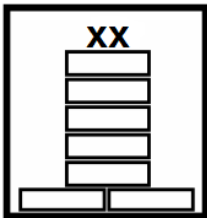

**Validade: 5 anos da data de fabricação.**