

# ***INJEX*** **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.  
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170  
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br  
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA INJEX**

#### **Fabricado por:**

#### **SHANDONG CHENGWU SAINUO MEDICAL DEVICES CO., LTD.**

Beicheng Development Zone, North Section of Deshang Road, Chengwu County (West Side, 1000 meters to the North of Paper Mill), Zip code 274200.

#### **Importado e distribuído por:**

#### **INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

Av. Comendador José Zillo n° 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscrição. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: [www.injex.com.br](http://www.injex.com.br)

Cadastro ANVISA/MS: 10160610124

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP: 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

#### **INSTRUÇÕES DE USO:**

1. Verifique a data de validade;
2. Abra o lacre do estojo plástico torcendo o protetor menor deixando aparecer o canhão da agulha, sem retirar o protetor da cânula;
3. Rosqueie a agulha no ADAPTADOR DE AGULHA;
4. Aplique o garrote e faça a assepsia local;
5. Retire o protetor da agulha;
6. Faça a punção e empurre o tubo que está no interior do adaptador contra a agulha (recoberta por uma capa de borracha). A borracha retrainará e a agulha perfurará a rolha do tubo;
7. Tão logo o sangue comece a fluir para dentro do tubo, retire o garrote;
8. Uma vez que o sangue pare de fluir, indicando que o volume já foi aspirado; retire o tubo de dentro do adaptador. Introduza outro tubo para outras coletas, caso necessário.

## ***INJEX*** **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

**AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.  
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170  
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br  
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80**

9. Remova o conjunto adaptador-agulha. Descarte o conjunto em recipiente apropriado para perfurocortantes;
10. Pressione o local da punção com algodão ou gaze esterilizada por alguns segundos.
11. Após o uso descarte o produto em local apropriado;
12. Nunca reutilize o produto. Nunca reesterilize.