

INJEX **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

INSTRUÇÕES DE USO

DOSADOR ORAL DE USO ÚNICO DIVERSOS CALIBRES

Fabricado por:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscriç. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Registro ANVISA nº: 10160619001

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

Instruções de Uso:

- Colocar o adaptador na boca do frasco;
- Pressioná-lo com firmeza;
- Inserir o dosador oral no adaptador;
- Virar o frasco e aspirar a quantidade desejada;
- Tampar o dosador;
- Identificar o dosador com a etiqueta (para identificação do paciente e medicamento);
- Tampar o frasco de medicamento;
- Injetar lentamente na boca do paciente com a cabeça semi- levantada.

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80



1
COLOCAR ADAPTADOR NA BOCA DO FRASCO.



2
PRESSIONÁ-LO COM FIRMEZA.



3
INSERIR O DOSADOR ORAL NO ADAPTADOR.



4
VIRAR O FRASCO E ASPIRAR A QUANTIDADE DESEJADA.



5
TAMPAR O DOSADOR ORAL.



6
IDENTIFICAR O DOSADOR ORAL COM ETIQUETA (PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E MEDICAMENTO).



7
TAMPAR O FRASCO DE MEDICAMENTO.



8
INJETAR LENTAMENTE NA BOCA DO PACIENTE COM A CABEÇA SEMI LEVANTADA.

