

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

ANEXO IIIB - RDC 185/2001

AGULHA PARA CANETA – INJEX INSTRUÇÕES DE USO

Obs.: As instruções de uso estão impressas nas embalagens secundárias.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo n° 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscriç. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

SAC: 0800-770 60 80

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto

CADASTRO ANVISA/MS nº: 10160619013

2- Agulha para Caneta - INJEX

Especificações: _____ indicado na embalagem;

Contém: XX unidades

Lote – impresso nas embalagens primária e secundária;

F/ Validade 05 anos com a embalagem intacta;

Produto de uso único. Descartar após o uso. Proibido reprocessar.

Símbolo utilizado:



INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Retire a tampa da caneta.
- 2- Retire o lacre adesivo da Agulha para Caneta - INJEX.
- 3- Conectar a agulha na caneta realizando movimento de rosqueamento até o travamento da mesma.
- 4- Regular a dose prescrita pelo médico no corpo da caneta.
- 5- Retirar o protetor externo que embala todo o conjunto da agulha.
- 6- Retirar o protetor da cânula somente no momento da aplicação.
- 7- Testar o fluxo antes de introduzir a agulha na pele.
- 8- Realizar assepsia do local.
- 9- Aplicar o medicamento.
- 10- Retirar a agulha e descartar de forma segura.

Fabricante: Tianjin Huahong Technology CO., LTD.

ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL LEGAL E TÉCNICO

Rafael Saldanha Rodrigues
Responsável Legal

Luiz Saldanha Rodrigues Neto
Responsável Técnico
CREA-SP 5061280667