

INSTRUÇÕES DE USO

AGULHAS HIPODÉRMICAS DE USO ÚNICO INJEX

FABRICADO POR:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo n° 160

Distrito Industrial I – Ourinhos/SP

CEP: 19908-170

Indústria Brasileira

CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscrição. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Cadastro ANVISA-MS n°: 10160610061

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP: 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

INSTRUÇÕES DE USO:

Todos os procedimentos de uso do produto devem ser realizados sob técnica asséptica e por profissional devidamente treinado;

- Abrir a embalagem e retirar a Agulhas hipodérmicas de uso único INJEX utilizando técnica asséptica;
- Separe as pétalas de abertura até que o canhão da agulha fique aparente;
- Conecte o canhão na seringa fazendo um movimento de pressão rotacionando a agulha;
- Retirar o protetor da agulha e realizar o procedimento;
- Após o procedimento não recolocar o protetor e descartar no coletor de perfuro cortante;
- Artigo Médico Hospitalar de uso único para injeção, aspiração de fluidos ou administração de medicamentos via parenteral;
- Mantém suas características para uma só vez de uso, não reesterilizável;
- Após o uso descarte o produto em local apropriado;
- Nunca reutilize o produto. Nunca reesterilize.