

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **AGULHA HIPODÉRMICA INJEX COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA**

#### **Fabricado por:**

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscrição Estadual: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: [www.injex.com.br](http://www.injex.com.br)

E-mail: [injex@injex.com.br](mailto:injex@injex.com.br)

Cadastro ANVISA/MS: 10160610031

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP: 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

Esterilizado a Óxido de Etileno.

#### **Instruções de Uso**

- 1) Todos os procedimentos de uso do produto devem ser realizados sob técnica asséptica e por profissional devidamente treinado;
- 2) Abrir a embalagem e retirar as Agulhas Hipodérmicas de uso único INJEX utilizando técnica asséptica;
- 3) Separe as pétalas de abertura até que o canhão da agulha fique aparente;
- 4) Conecte o canhão na seringa fazendo um movimento de pressão rotacionando a agulha quando o bico for do tipo slip e rosquear o canhão quando o bico for do tipo lock;
- 5) Retire o protetor da agulha de forma a não danificar a ponta da agulha;
- 6) Após o uso acionar o protetor automático da agulha utilizando a técnica de apenas uma mão. Pressionar o protetor automático de encontro a uma superfície plana (bancada ou mesa) para que o bisel da agulha fique protegido. Poderá ouvir um clique indicando que a agulha está encaixada no dispositivo de segurança de proteção da agulha.
- 7) Descartar o produto em local apropriado;
- 8) Nunca reutilize o produto. Nunca reesterilize.