

***INJEX* INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

INSTRUÇÕES DE USO

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - INJEX

LUVA DE LÁTEX - NÃO ESTÉRIL - AMBIDESTRA - COM PÓ - TAMANHO: _____

Fabricado por:

HAPPY HANDS GLOVES CO., LTD.

43/16 MOO 1, T.BANGDUEN, A. PHUN PHIN, SURAT THANI 84130, THAILAND.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscriç. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Cadastro ANVISA nº:10160610114

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP: 5061280667

SAC/OUVIDORIA: 0800-770 60 80

I. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto:

A Luva para Procedimento Não Cirúrgico - INJEX é indicada para proteção das mãos de profissionais da saúde em geral (médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares, etc.) durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios.

A Luva para Procedimento Não Cirúrgico - INJEX, além de garantir a assepsia do procedimento, protege o profissional que a está utilizando, de possíveis contaminações bacterianas, viróticas e parasitárias. Atuam reduzindo ou eliminando o risco de contaminação do usuário, funcionando como uma barreira mecânica a secreções sanguíneas e fluídos.

II. Especificações e características técnicas do produto:

A **Luva Procedimento Não Cirúrgico - INJEX** é confeccionada em látex de borracha natural, conferindo assim alta sensibilidade aos usuários, é produzida nos tamanhos: extra-pequena PP, pequena P, média M e grande G. Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

III. Instruções de Uso:

Deve-se primeiramente ser feita uma breve assepsia com a lavagem das mãos e posterior secagem das mesmas;

Verificar a integridade da embalagem. Retirar a luva e utilizar de acordo com os procedimentos padronizados no local de trabalho;

Verificar se a luva não apresenta furos ou rasgos antes do seu uso;

Calçar a luva cuidadosamente, sem anéis, pulseiras ou outros objetos que possam perfurar a luva;

Executar o procedimento;

Após o uso, retirar a luva, descartando-a imediatamente em local apropriado para materiais potencialmente contaminados;

Não reutilizar ou esterilizar a luva após o seu primeiro uso.

ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX. SUSPENDA O USO EM CASO DE IRRITAÇÃO OU ALERGIA E PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.