

INSTRUÇÕES DE USO

SERINGA PARA INSULINA DESCARTÁVEL COM AGULHA SERINGA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA INSULINA COM AGULHA

Fabricado por:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Registro ANVISA nº: 10160610013

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

Instruções de uso

Selecionar o tipo de seringa conforme sua graduação e calibre de agulha;

Utilizar somente se a embalagem estiver intacta;

Verificar prazo de validade;

Abrir a embalagem conforme técnica asséptica.

Aplicar Medicamentos:

1. Abrir blister unitário ou embalagem múltipla de forma asséptica;
2. Retirar o protetor da agulha;
3. Aspire o medicamento lentamente para evitar formação de bolhas;
4. Após aspirar a dose prescrita pelo médico, apertar lentamente o êmbolo para retirar e garantir que não permaneceu nenhuma bolha de ar dentro da seringa;
5. Fazer a assepsia no paciente no local da aplicação;
6. Realizar a aplicação;
7. Descarte a seringa em local apropriado, após o uso.