

# ***INJEX*** **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.  
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170  
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br  
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **LANCETA DE SEGURANÇA INJEX**

#### **1- FABRICADO POR:**

**TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO.,LTD.**

A01, Plant B, No.278, Hangkong Road, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin 300308,  
China.

#### **IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**

**INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: [www.injex.com.br](http://www.injex.com.br)

Cadastro ANVISA/MS: 10160610121

SAC: 0800-770 60 80 [sac@injex.com.br](mailto:sac@injex.com.br)

#### **INSTRUÇÕES DE USO:**

##### **Modelos IJ-MJ, IJ-MI e IJ-RE**

- 1) Lavar e secar as mãos;
- 2) Higienizar o local da punção;
- 3) Retirar o protetor que protege o bisel da lanceta;
- 4) Posicionar a lanceta no local a ser puncionado;
- 5) Apertar a lanceta em direção ao local a ser puncionado até que a mesma dispare;
- 6) Aplicar o sangue na tira do exame;
- 7) Usar algodão seco para cessar a hemorragia do local puncionado;
- 8) Descartar a lanceta já protegida automaticamente contra o perfurocortante em local adequado.

***INJEX*** **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**  
AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.  
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170  
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br  
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

**Modelo IJ-MA**

- 1) Lavar e secar as mãos;
- 2) Higienizar o local da punção;
- 3) Retirar o protetor que protege o bisel da lanceta;
- 4) Ajustar a altura do apoio de disparo;
- 5) Posicionar a lanceta no local a ser puncionado;
- 6) Apertar a lanceta em direção ao local a ser puncionado até que a mesma dispare;
- 7) Aplicar o sangue na tira do exame;
- 8) Usar algodão seco para cessar a hemorragia do local puncionado;
- 9) Descartar a lanceta já protegida automaticamente contra o perfurocortante em local adequado.