

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **LANCETADOR INJEX**

#### **FABRICADO POR:**

Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co.,Ltd.

No. 1 Shuangshan Sanjian Roadn 250200 Zhangqiu City, Jinan, Shandong., China.

#### **IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:**

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

Avenida Comendador José Zillo, 160 - Distrito Industrial I.

CEP: 19.908-170 - Ourinhos – SP

CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscr. Est.: 495.044.013.118

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto - CREA-SP: 5061280667

FONE/PABX: (14) 3302-2900

SAC: 0800 770 6080

Cadastro ANVISA/ MS: 10160610105

SITE: [www.injex.com.br](http://www.injex.com.br)

#### **Instruções de uso**

##### **IJ01**

- 1 - Desrosqueie a tampa do lancetador
- 2 - Coloque uma lanceta Injex no suporte. Pressionando a bipartição do suporte, retire o protetor da lanceta.
- 3 - Recoloque a tampa do lancetador.
- 4 - Gire a parte frontal da tampa do lancetador e selecione o nível de penetração mais adequado para a pele que vai ser puncionada. 1 e 2 para pele delicada ou fina, 3 e 4 para pele normal, 5 para pele grossa ou com calosidade.
- 5 - Arme o lancetador puxando o tambor para ativar a pressão da mola e solte-o. Ele retornará para a posição inicial e estará pronto para ser utilizado.
- 6 - Após realizar a assepsia do local a ser puncionado, posicione a ponta do lancetador firmemente contra o mesmo e aperte o botão de disparo. Massageie delicadamente o local até formar a gota de sangue necessária.
- 7 - Desrosqueie a tampa do lancetador, retire a lanceta e descarte-a em local apropriado.

## **IJ02**

- 1 - Desrosqueie a tampa do lancetador
- 2 - Coloque uma lanceta Injex no suporte. Pressionando a bipartição do suporte, retire o protetor da lanceta.
- 3 - Recoloque a tampa do lancetador.
- 4 - Gire a parte frontal da tampa do lancetador e selecione o nível de penetração mais adequado para a pele que vai ser puncionada. Os 2 indicadores menores para pele delicada ou fina, os 2 indicadores intermediários para pele normal, os dois indicadores maiores para pele grossa ou com calosidade.
- 5 - Arme o lancetador puxando o tambor para ativar a pressão da mola e solte-o. Ele retornará para a posição inicial e estará pronto para ser utilizado.
- 6 - Após realizar a assepsia do local a ser puncionado, posicione a ponta do lancetador firmemente contra o mesmo e aperte o botão de disparo. Massageie delicadamente o local até formar a gota de sangue necessária.
- 7 - Desrosqueie a tampa do lancetador, retire a lanceta com o auxílio do dispositivo de extração e descarte-a em local apropriado.

## **IJ03**

- 1 - Desrosqueie a tampa do lancetador
- 2 - Coloque uma lanceta Injex no suporte. Pressionando a bipartição do suporte, retire o protetor da lanceta.
- 3 - Recoloque a tampa do lancetador.
- 4 - Gire a parte frontal da tampa do lancetador e selecione o nível de penetração mais adequado para a pele que vai ser puncionada. Os 10 indicadores seguem do menor para pele delicada e fina até os maiores que são indicados para pele grossa ou com calosidade.
- 5 - Arme o lancetador puxando o tambor para ativar a pressão da mola e solte-o. Ele retornará para a posição inicial e estará pronto para ser utilizado, o botão de disparo mudará de cor quando o lancetador estiver armado.
- 6 - Após realizar a assepsia do local a ser puncionado, posicione a ponta do lancetador firmemente contra o mesmo e aperte o botão de disparo. Massageie delicadamente o local até formar a gota de sangue necessária.
- 7 - Desrosqueie a tampa do lancetador, retire a lanceta com o auxílio do dispositivo de extração e descarte-a em local apropriado.

**Tempo recomendado de uso:** 6.600 disparos.