

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

INSTRUÇÕES DE USO

Seringa Descartável com agulha Injex

Seringa Hipodérmica Estéril de Uso Único para Uso Manual com Agulha

Fabricado por:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Registro ANVISA nº: 10160610002

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

Instruções de Uso:

- Abrir o blister ou a embalagem a granel de forma asséptica;
- Aspirar o medicamento lentamente para evitar formação de bolhas;
- Após aspirar a dose prescrita pelo médico, apertar lentamente o êmbolo para retirar o ar e garantir que não permaneceu nenhuma bolha de ar dentro da seringa.
- Fazer a assepsia no paciente no local da aplicação/punção.
- Realizar a aplicação. Injetar o medicamento até o final fazendo com que o êmbolo chegue ao final do cilindro. Retirar a seringa e colocar algodão seco no local.
- Descarte a seringa em local apropriado, após o uso.
- Uma agulha hipodérmica ou qualquer outro dispositivo médico com cone luer 6% fêmea podem ser encaixados no bico de seringa.
- Produto de uso único. Descartar após o uso. Proibido reprocessar;
- Descarte este produto com segurança;
- Verificar o prazo de validade da esterilização;
- Utilizar somente se a embalagem estiver intacta.