

INSTRUÇÕES DE USO
BOLSA DE URINA - INJEX

FABRICADO POR:

ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO..

Factory: Arab El-Awamer, Industrial Zone, Abnoub, Assiut, Egypt.

Head Quarter: 64 Nakhla El Motaiy St., Triumph Square, Cairo, Egypt.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

Av. Comendador José Zillo, nº 160 - Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP:
19908-170 - Fone / Fax: (14) 3302-2900

CNPJ: 59.309.302/0001-99 / Insc. Est.: 495.044.013.118

Central de Atendimento ao Cliente: SAC: 0800-770 6080 / sac@injex.com.br /
www.injex.com.br

Cadastro ANVISA/MS nº: 10160610131

Instruções de Uso

- 1- Fazer a inspeção visual do produto quanto à integridade da embalagem primária e validade do produto;
- 2- Verificar o tubo extensor e o tubo de drenagem quanto à presença de memória. Caso o tubo apresente memória, descartar e utilizar um novo produto;
- 3- Fechar a pinça do tubo extensor e a válvula do tubo de drenagem;
- 4- Retirar a tampa protetora do conector do tubo extensor da Bolsa Coletora de Urina e conectar ao terminal da sonda de Foley (ou sonda de Demora), previamente preparada;
- 5- Posicionar a tubulação para assegurar um fluxo sem obstáculos para a Bolsa Coletora de Urina;
- 6- Abrir a pinça do tubo extensor;

- 7- Pendurar a Bolsa Coletora de Urina, através do seu suporte de fixação tipo cabide, no suporte da cama, ou fixar na perna do paciente, através dos cordões de fixação;
- 8- A observação periódica deste sistema deverá ser feita para assegurar que a urina esteja fluindo livremente. Se uma coluna imóvel de urina for observada, checar quanto ao posicionamento correto da bolsa e da tubulação e então quanto a uma obstrução física;
- 9- Quando o volume da urina for maior que o volume nominal do corpo da bolsa, um profissional habilitado deverá abrir a pinça do tubo de drenagem da Bolsa Coletora de Urina para descartar o conteúdo.