

INSTRUÇÕES DE USO

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - INJEX

FABRICADO POR:

SHANGHAI HEALTH MEDICAL CO., LIMITED.

No. 143 North Qingyang Road Tianning District Changzhou City 213017 Jiangsu, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

Av. Comendador José Zillo, nº 160 - Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP:
19908-170 - Fone / Fax: (14) 3302-2900

CNPJ: 59.309.302/0001-99 / Insc. Est.: 495.044.013.118

Central de Atendimento ao Cliente: SAC: 0800-770 6080 / sac@injex.com.br /
www.injex.com.br

Cadastro ANVISA/MS nº: 10160610129

Instruções de Uso

- 1) Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade do Equipamento para Nutrição Enteral – INJEX, utilizando somente se a embalagem estiver intacta;
- 2) Abrir a embalagem conforme técnica asséptica;
- 3) Retirar a tampa protetora da ponta perfurante ou ponta rosqueável;
- 4) Conectar o equipamento ao frasco ou bolsa plástica descartável ou diretamente no frasco da dieta (se for o sistema fechado). A pinça rolete do equipamento deve estar fechada. Suspender o frasco pelo menos 60 cm acima da cabeça do paciente.
- 5) Abrir a pinça rolete para permitir que o líquido esorra até o outro extremo do equipamento;
- 6) Fechar a pinça rolete, conectar o extremo do equipamento na sonda e regular a velocidade de administração com o equipamento, conforme prescrição médica.
- 7) Verifique se a sonda esteja fixa, garantindo que a alimentação esteja sendo feita da forma correta.