

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **SERINGA DE ÊMBOLO QUEBRÁVEL COM AGULHA INJEX SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL COM AGULHA**

Fabricado por:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscrição Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: [www.injex.com.br](http://www.injex.com.br)

Cadastro ANVISA nº: 10160610006

SAC: 0800-770 60 80

#### **Instruções de uso:**

1. Abrir o blister de forma asséptica;
2. Conectar a agulha;
3. Aspirar o medicamento lentamente para evitar formação de bolhas;
4. Após aspirar a dose prescrita pelo médico apertar lentamente o êmbolo para retirar o ar e garantir que não permaneceu nenhuma bolha de ar dentro da seringa;
5. Fazer a assepsia no paciente no local da aplicação;
6. Realizar a aplicação. Injetar o medicamento até o final fazendo com que o êmbolo chegue ao final do cilindro;
7. Retirar a seringa e colocar algodão seco no local;
8. Após a utilização, puxe o êmbolo até o final da graduação;
9. Antes de realizar a quebra do êmbolo certifique-se de que a seringa está vazia;
10. Para segurança do usuário, quando quebrar o êmbolo, segure a seringa a distância e voltada para baixo. Mantenha a seringa sempre sob vigilância, a fim de evitar acidentes com a agulha;
11. Quebre, fazendo um movimento lateral;
12. Introduza o êmbolo até o fim;
13. Descartar em local apropriado conforme legislação local.

## BREAK OFF SYSTEM



Após a utilização  
de nosso produto

Después de la utilización  
de nuestro producto


After using our product



Puxe o êmbolo até o  
final da graduação.

Tire el pistón hasta el  
término de la graduación


Pull the plunger to the  
graduation end

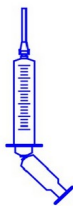

Quebre, fazendo um  
movimento lateral.

Quiebre, haciendo un  
movimiento lateral.

Break it to the side

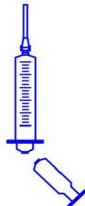

Introduza o êmbolo  
até o fim e descarte

Introduzca el pistón  
hasta el final y elimine.

Introduce the plunger  
to the end and discard it.

### Precauções

Produto de uso único. Destruir após o uso.  
Descarte este produto com segurança.  
Verificar o prazo de validade da esterilização.  
Utilizar somente se a embalagem estiver intacta.  
Proibido Reprocessar.

### Precauciones

Producto de uso único. Destruya después del uso.  
Elimine este producto con seguridad.  
Examine el plazo de validez de la esterilización.  
Utilice solo si el envase no esta dañado.  
Prohibido Reprocessar

### Caution

Single use product. Destroy after use.  
Discard this product in safety.  
Check sterilization expiration date.  
Use only if package is undamaged.  
Prohibited Reporcess