

# ***INJEX*** **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.  
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170  
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br  
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **SERINGAS INJEX SAFETY - SERINGAS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM AGULHA**

#### **Fabricado por:**

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: [www.injex.com.br](http://www.injex.com.br)

Registro ANVISA nº: 10160610026

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

#### **Instruções**

Seringa indicada para aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fluídos e soluções parenterais, apresentando dispositivos de segurança para os perfuro cortantes - agulha - evitando acidentes com os usuários e também o êmbolo quebrável que permite o descarte sem risco de reuso da seringa.

1. Manter o protetor convencional da agulha até o momento do uso.
2. Verificar se a agulha está firmemente conectada no bico da seringa.
3. Retirar o protetor convencional da agulha.
4. Realizar o procedimento.
5. Após a utilização da seringa, acionar (empurrar) o protetor articulado utilizando a superfície de uma mesa ou bancada "alojando" a agulha de forma segura.
6. Em seguida quebrar o êmbolo inutilizando o produto. Desta forma evita-se o reuso.
7. Descartar o conjunto em local apropriado.