

INSTRUÇÕES DE USO
TORNEIRA DE TRÊS VIAS – INJEX

Fabricado por:

MEDIPLUS (INDIA) LIMITED.

1261-1262, M.I.E., PART-B, BAHADURGARH – 124507, HARYANA, INDIA.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

CNPJ: 59.309.302/0001-99

Insc. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Cadastro ANVISA nº:10160610116

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP: 5061280667

SAC/OUVIDORIA: 0800-770 60 80

Instruções de Uso:

- Todos os procedimentos de uso do produto devem ser realizados sob técnica asséptica e por profissional devidamente treinado;
- Verifique a data de validade;
- Abrir a embalagem e retirar a torneira utilizando técnica asséptica;
- Retire a torneira de sua embalagem em condições assépticas;
- Retire a tampa protetora das conexões;
- Conecte o conector luer macho no acesso venoso;
- No conector luer fêmea conecte a seringa ou equipo para realizar a infusão necessária;
- Para que possa ocorrer a infusão pela via desejada, virar o manípulo para liberar a passagem;
- Após o uso, descarte o produto em local apropriado;
- Nunca reutilize o produto. Nunca reesterilize.