

INJEX **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**
AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

INSTRUÇÕES DE USO

AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL INJEX AGULHA GENGIVAL ESTÉRIL DE USO ÚNICO

Fabricado por:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Registro ANVISA nº: 10160610009

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

Instruções de uso

Abra o lacre torcendo o protetor deixando aparecer o canhão da agulha.

Conectar o canhão da agulha na seringa e girá-lo para a direita.

Ao manipular as agulhas utilize técnicas assépticas e instrumentos adequados

Nota: tenha cuidado para evitar acidentes com a agulha

Retire o protetor longo do canhão da agulha. Após o uso da agulha utilize o protetor longo para sua retirada e descarte com segurança