

INSTRUÇÕES DE USO

SERINGAS INJEX SAFETY - SERINGAS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEM AGULHA

Fabricado por:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Registro ANVISA nº: 10160610027

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

Instruções

Seringa indicada para aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fluidos e soluções parenterais, apresentando dispositivos de segurança para os perfuro cortantes - agulha - evitando acidentes com os usuários e também o êmbolo quebrável que permite o descarte sem risco de reuso da seringa.

1. Conectar uma agulha na seringa mantendo o protetor convencional da agulha até o momento do uso
2. Verificar se a agulha está firmemente conectada no bico da seringa
3. Retirar o protetor convencional da agulha
4. Realizar o procedimento
5. Após a utilização da seringa acionar (empurrar) o protetor articulado utilizando a superfície de uma mesa ou bancada "alojando" a agulha de forma segura.
6. Em seguida quebrar o êmbolo inutilizando o produto. Desta forma evita-se o reuso.
7. Descartar o conjunto em local apropriado.