

INJEX **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

INSTRUÇÕES DE USO

LANCETA HIPODÉRMICA INJEX

1- FABRICADO POR:

TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO.,LTD.

A01, PLANT B, Nº278, HANGKONG ROAD, TIANJIN PILOT FREE TRADE ZONE,
TIANJIN 300308, CHINA.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Cadastro ANVISA/MS: 10160610110

SAC: 0800-770 60 80 sac@injex.com.br

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1) Lavar e secar as mãos;
- 2) Inserir a Lanceta no compartimento do Lancetador;
- 3) Retirar o protetor da Lanceta;
- 4) Selecionar o ajuste de penetração do Lancetador conforme indicado pelo fabricante;
- 5) Realizar a punção do sangue;
- 6) Aplicar o sangue na tira do exame;
- 7) Usar algodão seco para cessar a hemorragia do local puncionado;
- 8) Descartar a lanceta em local adequado.