

INJEX **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**
AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

INSTRUÇÕES DE USO
AGULHA INJEX PARA IRRIGAÇÃO

FABRICADO POR:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo n° 160

Distrito Industrial I – Ourinhos/SP

CEP: 19908-170

Indústria Brasileira

CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Registro ANVISA n°: 10160619006

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP: 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

INSTRUÇÕES DE USO

- Separe as pétalas de abertura até que o canhão da agulha fique aparente;
- Conecte o canhão na seringa fazendo um movimento de pressão rotacionando a agulha quando o bico for do tipo slip e rosquear o canhão quando o bico for do tipo lock;
- Retirar o protetor da agulha para uso;
- Após o uso descartar a seringa com a agulha sem recolocar o protetor;
- Descartar no coletor de perfurocortante.

Agulha de irrigação não apresenta bisel, não indicada para realizar punções.