

INJEX **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

INSTRUÇÕES DE USO

INFUSOR MÚLTIPLO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES INJEX

FABRICADO POR:

WEIFANG HUAXING MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

Hualong Town, Shouguang City, Shandong Province, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo n° 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

SAC: 0800-770 60 80 ou sac@injex.com.br

Cadastro ANVISA-MS n°:

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP: 5061280667

Lote:

Fabricação:

Validade: 5 anos com embalagem intacta

Esterilizada a Óxido de Etileno.

Estéril – Atóxica – Apirogênico.

Produto de uso único. Descartar após o uso. Proibido reprocessar.

Símbolo utilizado:



INJEX **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

Instruções de Uso:

- Todos os procedimentos de uso do produto devem ser realizados sob técnica asséptica e por profissional devidamente treinado;
- Abrir a embalagem e retirar o Infusor Múltiplo para Administração Simultânea de Soluções Parenterais – Injex utilizando técnica asséptica;
- Fechar as pinças corta fluxo completamente;
- Preparar a solução de infusão conectando-a em uma das vias;
- Segurar o conector intermediário e as outras vias de acesso, abrindo as pinças para expulsar o ar enchendo os segmentos do tubo com a solução;
- Fechar completamente e tampar as vias de acesso sem infusão;
- Conectar o Infusor Múltiplo para Administração Simultânea de Soluções Parenterais – Injex ao acesso venoso;
- Manter o protetor do conector principal até o momento de conectá-lo ao acesso venoso;
- Após o uso descarte o produto em local apropriado;
- Não reutilize o produto. Descartar após o uso de acordo com a rotina da instituição.