

# **INJEX** INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.  
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170  
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br  
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **CATETER INTRAVENOSO INJEX-CATH**

#### **1- FABRICADO POR:**

**Mediplus (India) Limited**

**Unit 1: 1261-1262, M.I.E., Part-B, Bahadurgarh – 124507, Haryana (India).**

**Unit 2: 32, Sector-16, HSIDC, Bahadurgarh – 124507, Haryana (India).**

#### **IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**

**Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.**

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900 / Home Page: [www.injex.com.br](http://www.injex.com.br)

SAC: 0800-770 60 80

Cadastro ANVISA/MS: 10160619017

#### **2- Cateter Intravenoso Injex-Cath**

Tamanho: XXG x XXmm

#### **3 – Estéril – Atóxico – Apirogênico**

#### **4- Nº Lote**

**5- F: \_\_\_\_\_ Validade: 5 anos após a data de fabricação.**

**6- Produto de uso único. Descartar após o uso. Proibido reprocessar.**

#### **7- INSTRUÇÕES DE USO:**

- Selecione o tamanho apropriado do cateter intravenoso. Sempre utilize o menor tamanho possível para adequadamente distribuir os fluidos intravenosos desejados;
- Cuidadosamente escolha e limpe assepticamente o local a ser puncionado;
- Inspeção a embalagem do cateter quanto sua integridade e validade, remova o cateter da embalagem;

## ***INJEX*** **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.  
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170  
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: injex@injex.com.br  
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

- Remova o protetor do cateter/agulha e segure utilizando a câmara de refluxo, que permite fácil empunhadura;
- Introduza a cânula na veia sob um ângulo baixo (15° à 30°) e verifique o refluxo sanguíneo para assegurar uma adequada punção;
- Segure a câmara de refluxo firmemente no lugar e avance o cateter para dentro da veia e, segurando o canhão do cateter retire a agulha lentamente;
- Descarte em recipiente apropriado;
- Conecte o equipo a ser utilizado no canhão do cateter;
- Não tente reinsertar parcialmente ou completamente a agulha já retirada;
- Evite que o sangue espirre devido à pressão de dedos na veia, na ponta do cateter ou acima;
- Fixe o cateter no paciente utilizando método adequado;
- Inspeccione regularmente o local quanto às reações e verifique as conexões.