

SONDA FOLEY- INJEX

FABRICADO POR:

STERIMED SURGICALS INDIA PVT. LTD.

E-11, Govt. Indl. Área, Bahadurgarh – 124507 (Haryana), Índia.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

Av. Comendador José Zillo, nº 160 - Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP:
19908-170 - Fone / Fax: (14) 3302-2900

CNPJ: 59.309.302/0001-99 / Insc. Est.: 495.044.013.118

Central de Atendimento ao Cliente: SAC: 0800-770 6080 / sac@injex.com.br /
www.injex.com.br

Cadastro ANVISA/MS nº: 10160619021

Instruções de Uso

1. Utilizando processo asséptico, introduza a sonda lentamente e completamente na uretra do paciente, com um pouco de lubrificante em gel à base de água, não utilize vaselina ou qualquer outro lubrificante ou pomada à base de petróleo. Certifique-se de que o balão passa além do colo vesical. Caso encontre resistência, pare e reinicie o processo;
2. Ao introduzir a sonda no paciente, deverá ter muito cuidado em não causar nenhum dano na uretra, pois caso haja ferimento, este pode sangrar e colabar a sonda na uretra, que pode ocasionar desconforto e dor no paciente durante o tempo que o mesmo estiver sondado, podendo inclusive, dificultar e causar dor durante a retirada do dispositivo;
3. Após o procedimento asséptico, insufle o balão com água destilada estéril, usando uma seringa descartável estéril. A capacidade do balão é indicada no funil da sonda ou na etiqueta da embalagem. Não encher além da sua capacidade;
4. Para a garantia do funcionamento do dispositivo, verifique o fluxo de urina a partir do funil de drenagem;
5. Tracione lentamente até que se encontre resistência. Neste ponto a sonda deverá ser fixada na perna do paciente com fita adesiva.

6. O tempo máximo de permanência para um único dispositivo no paciente é de 14 dias, sugere-se que a substituição do mesmo seja a cada 7 dias evitando um maior risco ou agravamento de infecções do trato urinário ou lesão na mucosa do trato urinário, porém cabe ao médico definir o tempo de permanência da sonda no paciente, desde que esse tempo não exceda os 14 dias. Após esse prazo, o dispositivo deve ser obrigatoriamente substituído.
7. Antes de retirar o dispositivo, esvazie o balão;
8. Aspire lentamente o líquido com a seringa descartável estéril. Não aspire rapidamente durante o esvaziamento, pois pode provocar uma redução drástica de vácuo no lúmen de insuflação, prejudicando o processo normal de drenagem.
9. Todo o procedimento deverá ser feito de maneira asséptica.