

## **INSTRUÇÕES DE USO - LUVA CIRÚRGICA - INJEX**

**Luva Cirúrgica de Borracha Natural, Microtexturizada, Formato Anatômico, Estéril,  
Com Pó**

### **FABRICADO POR:**

SWEAR HEALTHCARE PVT. LTD.

F-374 RIICO Growth Center Extension Dholpur, (Rajasthan) - 328001 - India.

### **IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo, nº 160 - Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP:  
19908-170 - Fone / Fax: (14) 3302-2900

CNPJ: 59.309.302/0001-99 / Insc. Est.: 495.044.013.118

Central de Atendimento ao Cliente: SAC: 0800-770 6080 / [sac@injex.com.br](mailto:sac@injex.com.br) /  
[www.injex.com.br](http://www.injex.com.br)

Cadastro ANVISA/MS nº: 10160619022

### **INSTRUÇÕES DE USO**

- Realizar uma breve assepsia com a lavagem das mãos e posterior secagem das mesmas;
- Verificar a integridade da embalagem. Verifique o bom empacotamento do produto;
- Verificar se a luva não apresenta furos ou rasgos antes de seu uso;
- Não utilize o produto caso a embalagem tenha sido violada;
- Retirar a luva e utilizar de acordo com os procedimentos padronizados no local de trabalho;
- Calçar a luva cuidadosamente, sem anéis, pulseiras ou outros objetos que possam perfurar a luva;
- Executar o procedimento cirúrgico;
- Após o uso, retirar a luva, descartando-a imediatamente em local apropriado para materiais potencialmente contaminados;
- Não reutilizar ou esterilizar a luva após o seu primeiro uso.